


VSRAD結果画像をそのままDICOM化してPACSへ送信

# VSRAD<sup>®</sup> to PACS

VSRAD解析結果を簡単・安全・高速にPACS連携

VSRAD解析結果として出力された画像を自動でDICOM化し、PACSへ送信するWindowsアプリケーションです。  
シンプルな操作で、日常業務の効率化と確実な保存を実現します。

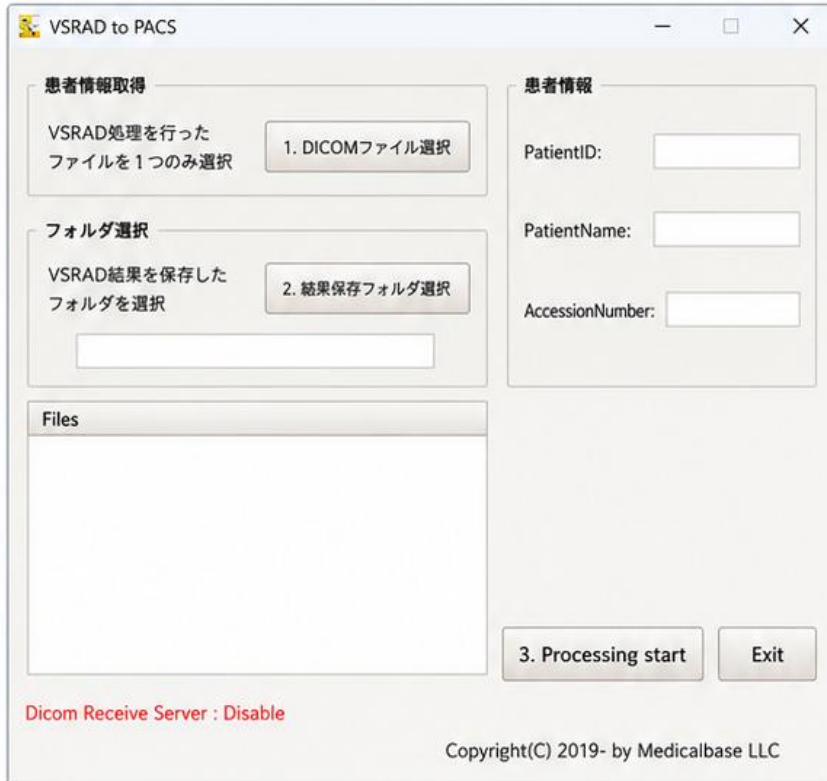

VSRADは、エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社の登録商標です。

## 主な機能



### 患者情報の自動取得

VSRAD解析に使用したDICOMから患者情報を自動で取得します。



### VSRAD画像をDICOM化

JPG / PNG / BMP画像をSecondary CaptureとしてDICOM化します。



### PACSへ直接送信

DICOM C-STOREでPACSへ直接送信します。



### DICOM受信サーバ対応 ※option


Storage SCP機能を搭載。受信したDICOMを自動保存します。



### 高い互換性と安定性

GE PACS文字コード対策対応。タイムアウト設定など実運用に最適化。

## ワークフロー

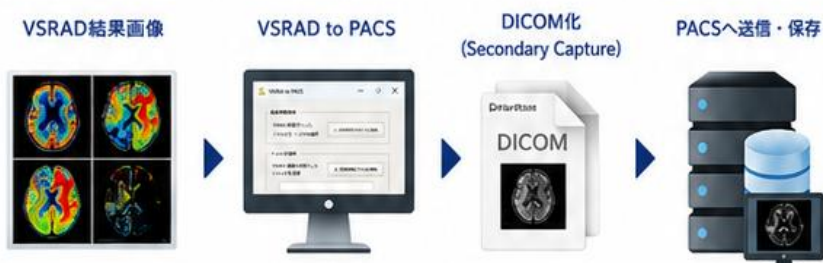

3ステップの簡単操作でPACSへ保存完了!

**1** 元DICOM選択  
VSRADでを使用したDICOMを1つ選択

**2** 結果フォルダ選択  
VSRAD結果画像が保存されたフォルダを選択

**3** Processing Start  
DICOM化してPACSへ送信  
自動で完了します

## 対応・仕様

対応OS	Windows 10 / 11
対応画像形式	JPG / JPEG / PNG / BMP
DICOM通信	C-STORE / C-ECHO
SOP Class	Secondary Capture Image Storage
Transfer Syntax	Explicit VR Little Endian
配布形式	Standalone EXE (インストール不要)



### シンプル操作

わかりやすい画面で  
どなたでも簡単に操作可能



### 安全・確実

DICOM標準準拠で  
安心して運用可能



### 高速・効率的

画像の自動処理で  
業務効率を向上

